

SERVICIOS

# Evaluación del colchón

## Realice auditorías regulares de colchones.

Los colchones desgastados pueden causar úlceras por presión e infecciones. Al realizar las evaluaciones de los colchones regularmente podremos reducir el número de lesiones en el ámbito sanitario.

Acostarse en colchones viejos y desgastados puede tener un impacto negativo en el usuario y a menudo acarrea problemas que inicialmente pretendía evitar, es decir, **redistribución uniforme del peso, disminución de los picos de presión proporcionar comodidad y garantizar seguridad**. A medida que la espuma del colchón se desplaza y envejece más allá de su vida útil técnica, **la estructura cambia y, eventualmente, la espuma puede "colapsar"**.

Para evitar esto, es importante como de antiguos son los colchones que se están utilizando. En los colchones y fundas de "Care of Sweden" siempre hay un sello con la fecha donde se puede leer la fecha de fabricación. Sin embargo, el uso y almacenamiento del colchón también pueden afectar su vida útil esperada. Al realizar evaluaciones regulares de los colchones con el objetivo de verificar su estado, se **pueden reemplazar aquellos que no cumplan con los requisitos en una etapa temprana**. Esto, a su vez, contribuye a una mejor economía de la salud y reduce el sufrimiento del usuario.

Utilice nuestros [protocolos de evaluación](#) como guía al realizar una auditoría de colchones.



Puede leer una guía paso a paso sobre cómo realizar una auditoría de colchones en la página siguiente. Si prefiere ver la guía en formato de video, [¡puede verla en nuestro canal de YouTube!](#)

## CÓMO LLEVARLA A CABO:

- 1. LOCALIZACIÓN:** Del sello de fecha en la funda para identificar su antigüedad e información del producto. Abra la funda y localice el sello de fecha en la espuma. La funda podría haber sido cambiada en algún momento, por lo que su antigüedad podría ser diferente a la de la espuma.
- 2. INSPECCIONAR LA FUNDA:** ¿Hay agujeros, manchas u otros daños visibles en la funda? Use una fuente de luz para inspeccionar el interior con mayor facilidad.
- 3. INSPECCIONAR LA ESPUMA:** Retire la funda. ¿Hay daños evidentes en la espuma, como agujeros, humedad o manchas? En ese caso, el colchón debe ser reemplazado. Asegúrese de inspeccionar ambos lados de la espuma.
- 4. EXAMINAR LA COMPOSICIÓN:** ¿Es posible sentir la base del colchón con las manos? Coloque las manos en forma de copa y use el peso de su cuerpo para presionar la espuma. Comience desde el extremo superior derecho del colchón y avance hacia el otro. Identifique la firmeza del mismo. Realice la misma operación en el centro del colchón y compare las presiones entre el extremo superior derecho del colchón y el centro del mismo.
- 5. FINALIZAR LA INSPECCIÓN:** Vuelva a colocar la funda. Si el colchón debe desecharse, es importante marcarlo claramente en el protocolo.

¿Necesita ayuda o asesoramiento?

Contáctenos:

Customer Care +46 (0) 771 106 600

[export@careofsweden.se](mailto:export@careofsweden.se)

[es.careofsweden.com](http://es.careofsweden.com)



Care of Sweden es una empresa innovadora del sector de la tecnología médica dedicada a la causa de la eliminación de las úlceras por presión en todo el mundo. Nuestra gama de productos abarca colchones, almohadas de posicionamiento y cojines de asiento, que se utilizan para prevenir y tratar las úlceras por presión. Nuestra sede central, I+D y producción se encuentran en Tranemo, en el oeste de Suecia, y nuestros productos se utilizan en centros asistenciales de muchas otras partes del mundo.

